

- Una seduta montata su telaio
- n. 2 maniglie di appoggio
- N.8 gommini a pinza con piolo

**Prodotto collaudato presso laboratori  
TUV Italia Srl , in accordo a standard  
europei armonizzati. Portata kg.120**

## Manuale di istruzioni . ART.034

### SEDILE PER VASCA SENZA SCHIENALE (Seduta per vasca da bagno per uso generico)

- ART.034 (Seduta massello Larice)

#### ASSEMBLAGGI

Montare le “pinze con piolo” in plastica in corrispondenza dei fori sulle maniglie di appoggio ( Figura 1). Accertarsi che il piolo sia ben inserito nel foro.



Figura 1



Figura 2

Inserire le maniglie di appoggio nel telaio della seduta (Una leggera forzatura è voluta per frenare lo scorrimento) (figura 2)–.



Figura 3

Posizionare il sedile sulla vasca, considerando che la misura interna della vasca, da bordo a bordo, deve essere compresa tra cm 66 e cm 75. Non si garantisce la tenuta del sedile al di fuori di tali valori. Mantenere la seduta centrata rispetto ai punti di appoggio delle maniglie. – Figura 3.

#### UTILIZZO

- Mantenere sempre una posizione corretta una volta seduti sul sedile evitando sbilanciamenti eccessivi e sedendosi al centro della seduta.
- Prima di ogni utilizzo e comunque periodicamente, verificare il corretto assetto del sedile per vasca.
- Mantenere all’asciutto il sedile dopo l’utilizzo.

- Manutenzione: Lavare periodicamente il sedile con sapone neutro. Accertarsi che le parti siano correttamente montate e che la seduta rimanga centrata rispetto ai punti di appoggio delle maniglie.

Superfici particolarmente lisce possono avere un effetto negativo sulla resistenza allo slittamento.



-Non salire sul sedile

-Non sollevare con persona seduta

**CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI PER REFERENZE FUTURE**

